

een vrouwelijke visie op permanente anticonceptie

U heeft geen kinderwens meer. U weet ook welke vorm van permanente anticonceptie u wilt — geen hormonen, geen chirurgische ingreep.



Veilig. Eenvoudig. Definitief. Adiana.

Adiana[®]
Permanente Anticonceptie

HOLOGIC[™]
The Women's Health Company

Met Adiana® Permanente Anticonceptie hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over anticonceptie.

Adiana® Permanente Anticonceptie is een eenvoudige, veilige, minimaal ingrijpende sterilisatieprocedure die zwangerschap permanent voorkomt. De werking: uw lichaamseigen weefsel wordt gestimuleerd tot groei in en rondom kleine, zachte plugjes die in uw eileiders worden geplaatst.

Waarom Adiana Permanente Anticonceptie?

- Het is permanent
- Het is veilig
- Het is effectief
- Er worden geen hormonen of geneesmiddelen gebruikt
- Er zijn geen incisies nodig
- Het is een eenvoudige procedure waarvan u snel herstelt
- Er blijft niets in de baarmoeder achter dat toekomstige gynaecologische onderzoeken of procedures zou kunnen verstoren

Een vrouwelijke
visie





Is Adiana® Permanente Anticonceptie geschikt voor mij?

Praat met uw arts om hierover zekerheid te krijgen. Lees om te beginnen de volgende uitspraken en ga na of ze op u van toepassing zijn:

- Ik wil permanente anticonceptie zonder de risico's van een chirurgische ingreep
- Ik wil voortaan van intimiteit genieten zonder bezorgd te zijn over zwangerschap.
- Ik maak me zorgen over langdurig gebruik van hormonen bij anticonceptie
- Ik wil een behandeling die mijn keuzemogelijkheden voor toekomstige gynaecologische onderzoeken of procedures niet beperkt

Als u er zeker van bent dat u in de toekomst geen kinderen wilt en alle bovenstaande uitspraken gecontroleerd heeft, kunt u het beste met uw arts over Adiana® Permanente Anticonceptie praten.

Een vrouwelijke
visie

Een vrouwelijke visie


De Adiana® procedure is veilig, eenvoudig en effectief.

Bij de Adiana®-procedure hoeft er niet in de huid gesneden te worden en de behandeling kan worden uitgevoerd onder lokale of algehele anesthesie.

De hele behandeling duurt doorgaans circa 12 minuten. De meeste vrouwen in het klinisch onderzoek gaven aan geen of slechts weinig pijn te ondervinden en hervatten hun dagelijkse bezigheden binnen een dag of twee.

Wanneer uw eileiders eenmaal volledig geblokkeerd zijn, is Adiana Permanente Anticonceptie voor zwangerschapspreventie vergelijkbaar met sterilisatie.[†]

* Gebaseerd op 3 jaar klinische gegevens uit het klinisch onderzoek "Evaluation of the Adiana System for Transcervical Sterilization (EASE)".

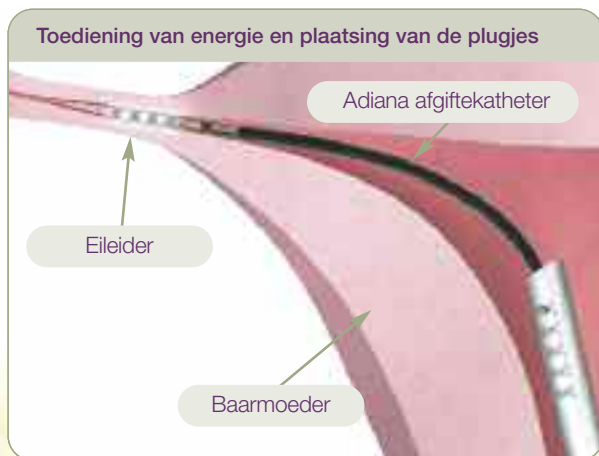


Via de vagina wordt in de eileiders een dun, flexibel slangetje geschoven dat een kleine hoeveelheid energie afgeeft in een klein gedeelte van beide eileiders. Een minuscuul, zacht plugje wordt in beide eileiders geplaatst, precies daar waar de energie is toegediend.

Hoe werkt Adiana® Permanente Anticonceptie?

Adiana® Permanente Anticonceptie stimuleert uw lichaamseigen weefsel om in en rondom kleine, zachte plugjes te groeien die in uw eileiders worden ingebracht.

Na de Adiana-procedure groeit er in en rondom de Adiana-plugjes nieuw weefsel. Na 3 maanden wordt een speciale röntgentest, HSG (hysterosalpingogram), uitgevoerd om te bevestigen of uw eileiders volledig geblokkeerd zijn. U moet gedurende 3 maanden na de behandeling een andere vorm van anticonceptie blijven gebruiken. Als uw eileiders eenmaal volledig geblokkeerd zijn, kan sperma de eicellen die uw eierstokken afgeven niet meer bereiken en kunt u voor anticonceptie op Adiana vertrouwen.[†]

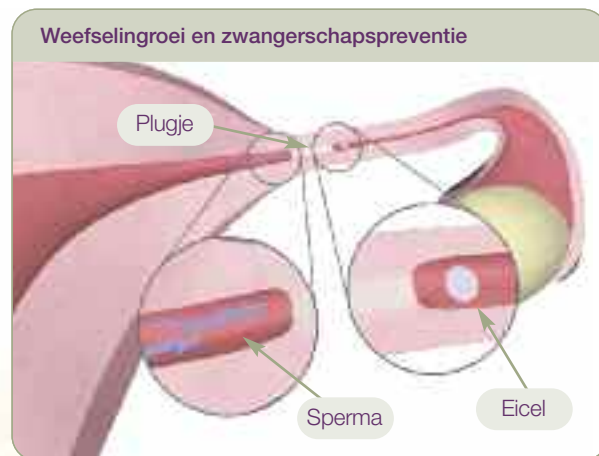

Gedurende de volgende 3 maanden zal uw lichaamseigen weefsel in en rondom de Adiana-plugjes groeien. Dit blokkeert de eileiders volledig en permanent.

Een vrouwelijke visie



Het minuscule, zachte Adiana-plugje is 3,5 mm lang, ongeveer even groot als een rijstkorrel.

Wat zijn de voordelen van Adiana® Permanente Anticonceptie?

Het is permanent.

Wanneer uw arts eenmaal heeft bevestigd dat uw eileiders volledig geblokkeerd zijn, hoeft u niet meer op tijdelijke anticonceptiemethoden te vertrouwen.†

Het is veilig.

De Adiana®-procedure vermijdt de risico's en het ongemak van een operatie, zoals sterilisatie en vasectomie. De minuscule, zachte Adiana-plugjes zijn gemaakt van siliconen voor geneeskundig gebruik, een materiaal dat sinds lang bekend staat als veilig voor het menselijk lichaam.

Het is effectief.

Adiana Permanente Anticonceptie is voor 98,4% effectief voor preventie van zwangerschap* nadat uw arts heeft bevestigd dat uw eileiders volledig zijn geblokkeerd. Geen enkele methode is 100% effectief.

* Gebaseerd op 3 jaar klinische gegevens uit het klinisch onderzoek "Evaluation of the Adiana System for Transcervical Sterilization (EASE)".

Geen medicijnen of hormonen.

De Adiana®-plugjes gebruiken geen medicijnen of hormonen die uw menstruatiecyclus of de natuurlijke chemie in uw lichaam kunnen verstoren.

Snel herstel.

Zonder incisies die moeten genezen zult u weinig of geen ongemak ondervinden en moet u uw normale activiteiten na een dag of twee kunnen hervatten.

Er blijft niets in uw baarmoeder achter.

De Adiana-plugjes zitten in de eileiders en laten niets in uw baarmoeder achter wat de mogelijkheden van toekomstige gynaecologische onderzoeken of behandelingen zou kunnen beperken.

† Adiana Permanente Anticonceptie beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Afgezien van onthouding bieden latexcondooms de meest effectieve bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals hiv (het virus dat aids veroorzaakt).



Een vrouwelijke visie

Adiana® Permanente Anticonceptie is de juiste oplossing voor vele vrouwen. Maar *niet* voor alle vrouwen.

Voordat u kiest voor een permanente sterilisatie-procedure, moet u al uw mogelijkheden grondig bespreken met uw arts; praat ook over de voordelen en risico's van de behandeling.

In de volgende gevallen is permanente anticonceptie *niet* geschikt voor u:

- Als u denkt dat de kans bestaat dat u in de toekomst nog kinderen wenst.
- Als u uw eileiders al hebt laten afbinden.¹
- Als u immunosuppressiva gebruikt (medicijnen die de natuurlijke afweer van uw lichaam verhinderen of blokkeren).
- Als u allergisch bent voor contrastvloeistof (de vloeistof die gebruikt wordt bij het Adiana HSG-bevestigingsonderzoek na 3 maanden).
- Als u baarmoederafwijkingen heeft, die het uitvoeren van de behandeling door uw arts kunnen verhinderen.
- Als u de behandeling niet aan beide eileiders kunt laten uitvoeren (ook als men meent dat één eileider al geblokkeerd is of als u slechts één eileider hebt).

Zoals bij alle medische ingrepen het geval is, zijn er ook aan de Adiana®-behandeling risico's verbonden. Dit zijn onder andere:

- Een kleine kans op zwangerschap (waaronder buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
- Het mislukken van goede plaatsing van de beide plugjes[‡]
- Symptomen tijdens of direct na de procedure, zoals:
 - Lichte tot matige kramp
 - Doorbraakbloeding of vaginaal bloedverlies
 - Bekken- of rugpijn
 - Misselijkheid

Raadpleeg voor een volledige lijst met waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke risico's het Adiana Informatieboekje voor Patiënten.

¹ Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates W, Stewart FH, Kowal D. Contraceptive Technology. Nineteenth Revised Edition. New York NY: Ardent Media, 2008.

[‡] Er bestaat een kleine kans dat uw arts niet in staat is de Adiana-plugjes in een of beide eileiders te plaatsen, of dat een of beide eileiders niet volledig worden geblokkeerd. Dan wordt aan u gemeld dat u niet op de Adiana-plugjes voor permanente anticonceptie kunt vertrouwen.

een vrouwelijke visie op
permanente anticonceptie.

Adiana[®]
Permanente Anticonceptie

Om meer te weten komen over
Adiana[®] Permanente Anticonceptie:

- Praat met uw arts
- Lees het Adiana Informatieboekje voor Patiënten
- Ga naar www.adiana.nl

©2009 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Adiana en het Adiana-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. Hologic en het Hologic-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. Adiana Permanente Anticonceptie wordt vervaardigd en gedistribueerd door Hologic, Inc. Adiana Permanente Anticonceptie wordt beschermd onder de volgende VS octrooiën: 6,309,384; 6,712,810; 6,780,182. Andere octrooiën aangevraagd.

HOLOGIC[™]
The Women's Health Company

www.hologic.com
PP-00025-1502 Rev. 002